

# ФСВОК-2019

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## Раздел «МИКРОСКОПИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО СЛИЗИСТОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА - ВЫЯВЛЕНИЕ ГОНОКОККОВ (окрашенные препараты лаборатории)»

### ИНСТРУКЦИЯ

#### по отбору препаратов и оформлению результатов

*Уважаемые коллеги!*

В этой посылке Вы получили контейнеры для отправки препаратов Вашей лаборатории для их оценки и повторного исследования. Кроме того, в посылке находится форма для предоставления сведений о препаратах и результатов их исследования (приложение 1, форма 1ГНК), а также этикетки для маркировки препаратов.

**Сохраните гофрокоробку и пузырчатый пакет, в который были упакованы контейнеры, для их повторного использования при отправке препаратов.**

#### Отбор и этикетирование препаратов

1. Отберите из препаратов отделяемого слизистой уrogenитального тракта, приготовленных и исследованных в Вашей лаборатории для выявления гонококков (**все отобранные препараты должны быть окрашены по Граму, оценка препаратов окрашенных другими методами невозможна**):

– 7 препаратов, в которых были выявлены грамотрицательные диплококки, морфологически сходные с гонококком;

– 3 препарата, в которых не были выявлены грамотрицательные диплококки, морфологически сходные с гонококком, или была выявлена иная кокковая флора.

2. Проверьте, удалено ли с препаратов иммерсионное масло, если нет, то накройте их фильтровальной бумагой, смочите ее несколькими каплями ксилола, толуола или этилового спирта и через 2-3 минуты удалите бумагу. Дайте препаратам просохнуть.

3. Наклейте на каждый из отобранных препаратов по одной из полученных этикеток.

#### Оформление результатов

Отправьте полученные результаты сразу после подготовки препаратов, используя формы в Вашем личном кабинете на интернет-порталах <http://www.fsvok.ru> или <http://asnpcvkk.fsvok.ru> (распечатку заполненной формы или заполненную бумажную форму необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с изготовленными в Вашей лаборатории препаратами).

При заполнении формы:

1. Внесите в форму 1ГНК сведения о препаратах, изготовленных в Вашей лаборатории, и результаты выявления в них грамотрицательных

диплококков, морфологически сходным с гонококком.

2. Внесите в соответствующую ячейку отметку о необходимости возврата препаратов.

3. Подпишите форму, укажите дату ее заполнения.

#### Упаковка и отправка препаратов

1. Сразу же после отправки заполненной формы через личный кабинет вложите препараты в присланные контейнеры, плотно закройте их и заклейте скотчем. Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку скотчем.

2. Позвоните по тел. **(495) 225-50-31** и сообщите оператору, что Вам необходимо вызвать курьера для отправки препаратов в АСНП «ЦВКК».

3. По приезде курьера вложите гофрокоробку с препаратами и заполненной формой в предложенную курьером упаковку.

4. Полученные от Вас препараты<sup>1</sup> будут переданы экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки качества изготовления препаратов и правильности выявления грамотрицательных диплококков, морфологически сходных с гонококком, в отделяемом слизистой уrogenитального тракта.

5. Если в форме была сделана соответствующая отметка, то препараты будут возвращены в лабораторию.

6. Результаты экспертного исследования, заключение и рекомендации по повышению качества выполняемых исследований будут размещены в Вашем личном кабинете<sup>2</sup>.

*С уважением,*

*АСНП «Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»*

<sup>1</sup> Для данного раздела за дату поступления результатов в АСНП «ЦВКК» принимается дата получения изготовленных в лаборатории препаратов.

<sup>2</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный или почтовый адрес.