

ФСВОК-2019

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ с использованием цифровых фотографий¹

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию цифровых фотографий и оформлению результатов

Уважаемые коллеги!

Вы получили CD/DVD-диски и документы для **трех циклов** по выбранным Вами разделам оценки качества цитологической диагностики с использованием цифровых микрофотографий. Каждый диск содержит цифровые фотографии 2 окрашенных цитологических препаратов материалов соответствующей локализации, представленные в виде файлов формата «ppt», каждый файл содержит 6 цифровых фотографий (всего 12 фотографий на диске). Файлы также содержат краткие клинические данные о пациенте, сведения о характере материала, способе окрашивания препарата и использованном увеличении.

ВНИМАНИЕ! Исследуйте цифровые фотографии через равные промежутки времени ПО ОДНОМУ ЦИКЛУ В КВАРТАЛ, указанный в бланках для представления результатов (приложения 1) и в расписании анализа контрольных образцов.

1. В выбранный Вами день текущего квартала проанализируйте цифровые фотографии соответствующего цикла.
2. Скопируйте файлы на жесткий диск компьютера, откройте их в программе Microsoft PowerPoint, включите режим «показ слайдов».
3. Ознакомьтесь со сведениями о цитологических препаратах, просмотрите их цифровые фотографии и установите соответствующие цитологические диагнозы.
4. **Сразу по окончании анализа внесите его результаты в соответствующую форму в Вашем личном кабинете на интернет-порталах: <http://www.fsvok.ru> или <http://asnpcvkk.fsvok.ru>².**

¹ Разделы с каталожными номерами 108, 109, 110, 111, 112 и 113 (цитологическая диагностика заболеваний шейки матки, желудка, щитовидной железы и молочной железы; цитологические исследования выпотных жидкостей, мокроты и материала бронхоскопии).

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.

1. Внесите установленные Вами цитологические диагнозы в той форме, которая принята в Вашей лаборатории.

2. Оцените качество цифровых фотографий. В случае неудовлетворительной оценки изложите Ваши замечания по качеству фотографий, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Присланные Вами формы будут проверены экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности и точности формулировок установленных диагнозов.

В течение двух недель после отправки результатов в Ваш личный кабинет будет помещен отчет по оценке их качества, о чем Вы будете уведомлены электронным письмом. Если Вы не обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, сообщите об этом!³

С уважением,

АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»

² При невозможности отправки результатов через портал заполните бумажную форму с соответствующим (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». **Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

³ По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный или почтовый адрес.