

ФСВОК-2019

*Программа межлабораторных
сличительных испытаний*

РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ с использованием препаратов лаборатории

ИНСТРУКЦИЯ

по отбору препаратов и оформлению результатов

Уважаемые коллеги!

В этой посылке Вы получили контейнеры для отправки рутинных иммуногистохимических препаратов Вашей лаборатории для их оценки и повторного исследования. Кроме того, в посылке находятся бланки для предоставления сведений о препаратах (приложение 1, форма 1 соответствующего раздела) и предварительного заключения лаборатории (приложение 2, форма 2 соответствующего раздела), а также этикетки для маркировки препаратов.

Сохраните гофрокоробку и пузырчатый пакет, в который были упакованы контейнеры, для их повторного использования при отправке препаратов.

Отбор и этикетирование препаратов

1. Сформируйте комплекты препаратов, исследованных в Вашей лаборатории. Каждый из комплектов должен состоять из одного иммуногистохимического препарата и соответствующего ему препарата, окрашенного гематоксилин-эозином (всего 4 комплекта в каждом из выбранных Вами разделов).

2. Проверьте, удалено ли с препаратов иммерсионное масло, если нет, то накройте их фильтровальной бумагой, смочите ее несколькими каплями ксилола, толуола или этилового спирта и через 2-3 минуты удалите бумагу. Дайте препаратам просохнуть.

3. Пронумеруйте препараты от 1 до 4, наклеив на каждый иммуногистохимический препарат этикетку с номером препарата и номером Вашей лаборатории, аналогично должны быть пронумерованы соответствующие им препараты, окрашенные гематоксилин-эозином.

Оформление результатов

Отправьте полученные результаты сразу после подготовки препаратов, используя формы в Вашем личном кабинете на интернет-портале <http://www.fsvok.ru> (распечатку заполненной формы или заполненную бумажную форму необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с изготовленными в Вашей лаборатории препаратами).

1. Внесите в форму 1 (соответствующего раздела) сведения о препаратах из Вашей лаборатории.

2. Внесите в соответствующую ячейку отметку о необходимости возврата препаратов.

3. Подпишите форму, укажите дату ее заполнения.

4. Внесите Ваши иммуногистохимические заключения, по отобранным препаратам в форму 2 (соответствующего раздела).

Упаковка и отправка препаратов

1. Сразу же после отправки заполненной формы через личный кабинет вложите препараты в присланные контейнеры, плотно закройте их и заклейте скотчем. Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку скотчем.

2. Позвоните по тел. **(495) 225-50-31** и сообщите оператору, что Вам необходимо вызвать курьера для отправки препаратов в АСНП «ЦВКК».

3. По приезде курьера вложите коробку с препаратами в предложенную курьером упаковку.

4. Поступившие в АСНП «ЦВКК» препараты¹ будут переданы экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки качества их приготовления.

5. Если в форме была сделана соответствующая отметка, то препараты будут возвращены в лабораторию.

6. Результаты экспертного исследования, заключение и рекомендации по повышению качества выполняемых исследований будут размещены в Вашем личном кабинете².

С уважением,

*АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»*

¹ Для данного раздела за дату поступления результатов в АСНП «ЦВКК» принимается дата получения изготовленных в лаборатории препаратов.

² По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный или почтовый адрес.