

# ФСВОК-2019

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ с использованием виртуальных препаратов

### ИНСТРУКЦИЯ

#### по исследованию виртуальных препаратов и оформлению результатов

*Уважаемые коллеги!*

Участникам разделов по оценке качества гистологических исследований с использованием виртуальных препаратов высылаются DVD-диски по выбранным разделам, содержащие по 4 виртуальных препарата<sup>1</sup> материалов соответствующей локализации и файл установки программы для просмотра препаратов.

К каждому диску приложены: инструкция, бланк для записи результатов исследования виртуальных препаратов, паспорт препаратов со сведениями о пациенте, характере материала и способе окрашивания препарата.

**Пожалуйста, исследуйте виртуальные препараты сразу после их получения.**

С этой целью:

1. Откройте файл установки программы для просмотра виртуальных препаратов и установите программу, следуя дальнейшим указаниям на экране<sup>2</sup>.

2. Ознакомьтесь со сведениями о гистологических препаратах. Откройте соответствующие файлы и просмотрите на экране компьютера виртуальные препараты, меняя по необходимости увеличение и область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет четким). Установите соответствующие гистологические диагнозы<sup>3</sup>.

**Отправьте полученные результаты, используя формы в Вашем личном кабинете на интернет-порталах <http://www.fsvok.ru> или <http://asnpcvkk.fsvok.ru>.**

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям<sup>4</sup>.

1. Внесите установленные Вами диагнозы.

2. Укажите дату заполнения формы, при использовании бумажной формы подпишите ее.

3. Оцените качество виртуальных препаратов. В случае неудовлетворительной оценки изложите Ваши замечания по качеству изображений, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Присланные Вами в АСНП «ЦВКК» формы будут проверены экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности и точности формулировок установленных диагнозов.

В течение двух недель после отправки результатов в Ваш личный кабинет будет помещен отчет по оценке их качества, о чем Вы будете уведомлены электронным письмом. Если Вы не обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, сообщите об этом!<sup>5</sup>

*С уважением, АСНП*

*«Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»*

<sup>1</sup> Получены сканированием окрашенных гистологических препаратов с использованием увеличения  $\times 400$ .

<sup>2</sup> При возникновении проблем с просмотром изображений обращайтесь в АСНП «ЦВКК» по телефону (495) 225-50-31.

<sup>3</sup> Часть изображений может иметь не совсем ровные края. Эти недостатки, связанные с техникой сканирования, не мешают установлению правильного цитологического диагноза.

<sup>4</sup> При невозможности отправки результатов через портал заполните бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК».

**Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

<sup>5</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный или почтовый адрес.