

ФСВОК-2019

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

РАЗДЕЛЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ с использованием виртуальных препаратов

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию виртуальных препаратов и оформлению результатов

Уважаемые коллеги!

Участникам разделов по оценке качества иммуногистохимических исследований с использованием виртуальных препаратов высылаются DVD-диски по выбранным разделам, содержащие логин и пароль для получения доступа к просмотру виртуальных препаратов в сети Интернет на сайте <http://viewer.fsvok.ru/>, а также руководство пользователя и паспорта препаратов со сведениями о пациенте и характере материала.

К каждому диску приложены: инструкция и бланк для записи результатов исследования виртуальных препаратов.

Пожалуйста, исследуйте виртуальные препараты сразу после их получения.

С этой целью:

1. Откройте файл, содержащий индивидуальные логин и пароль Вашей лаборатории для просмотра виртуальных препаратов и введите указанные в нем данные на сайте <http://viewer.fsvok.ru>, следуя указаниям, приведенным в руководстве пользователя.

2. Ознакомьтесь со сведениями об иммуногистохимических препаратах. Нажмите на ссылки, соответствующие названиям виртуальных препаратов и просмотрите на экране компьютера виртуальные препараты, меняя по необходимости увеличение и область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет четким). Установите соответствующие иммуногистохимические заключения.

Отправьте полученные результаты, используя формы в Вашем личном кабинете на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>.

1. Внесите установленные Вами иммуногистохимические заключения.

2. Укажите дату заполнения формы.

3. Оцените качество виртуальных препаратов. В случае неудовлетворительной оценки изложите Ваши замечания по качеству изображений, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Присланные Вами в АСНП «ЦВКК» формы будут проверены экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности и точности формулировок установленных диагнозов.

В течение двух недель после отправки результатов в Ваш личный кабинет будет помещен отчет по оценке их качества, о чем Вы будете уведомлены электронным письмом. Если Вы не обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, сообщите об этом!

С уважением, АСНП

«Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.

* При возникновении проблем с просмотром изображений обращайтесь в АСНП «ЦВКК» по телефону (495) 225-50-31.