

# ФСВОК-2019

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## Раздел «ВЫЯВЛЕНИЕ МБТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ»

Цикл 1-19

### ИНСТРУКЦИЯ

по выполнению исследований контрольных образцов и оформлению результатов

*Уважаемые коллеги!*

Вы получили набор из 12-ти контрольных образцов<sup>1</sup> и документы для выполнения первого цикла данного раздела.

Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за правильное хранение полученных образцов до их исследования.

#### **НАЧНИТЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СРАЗУ ПОСЛЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ.**

До использования храните образцы при температуре 2–8° в маркированных упаковках, в которых Вы их получили, но **НЕ ДОЛЬШЕ 10-ти ДНЕЙ.**

Результаты исследований должны быть представлены к датам, указанным в бланках для представления результатов (приложения к Инструкции - формы ТБ ЖС, ТБ ППС, ТБ МАК).

Контрольные образцы содержат суспензии микроорганизмов в жидкой среде, относящихся к III-й группе патогенности. Обращайтесь с контрольными образцами с теми же предосторожностями, как с любыми клиническими пробами, содержащими патогенные для человека микроорганизмы, а их исследования выполняйте с соблюдением действующих нормативных требований техники безопасности работы в медицинских лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007). Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством по использованию оборудования и реагентов.

#### **ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ**

Контрольные образцы должны быть исследованы как осадки мокроты, прошедшей предпосевную обработку, и вместе с ними.

1. В день исследования извлеките из холодильника упаковку с контрольными образцами и оставьте их на 30 мин при комнатной температуре.
2. Перемешайте каждый образец на «Вортексе» или путем многократного переворачивания и встряхивания, после чего осторожно вскройте их.
3. Если одновременное исследование всех 12-ти контрольных образцов вызывает у Вас трудности, разделите их на 2-3 партии и начните исследование по одной партии в последующие дни, в которые Вы бу-

<sup>1</sup> Изготовлены в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Свойства образцов позволяют осуществлять их транспортировку при температуре окружающей среды.

дете проводить исследование осадков мокроты пациентов.

#### **ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ**

Внесите и отправьте полученные результаты в Вашем личном кабинете на интернет-порталах <http://www.fsvok.ru> или <http://asnpcvkk.fsvok.ru><sup>2,3</sup>:

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Заполните форму для результатов исследований с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла.
2. Внесите коды полученных Вами результатов исследования контрольных образцов.
3. Внесите числа<sup>4</sup>, соответствующие, используемым Вами наборам реагентов. При их отсутствии приведите соответствующие сведения в графах «Другое».
4. Оцените качество контрольных образцов. При неудовлетворительной оценке изложите Ваши замечания по качеству контрольных образцов, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете<sup>5</sup> не позже, чем через две недели после назначенной даты представления результатов, о чем Вам будет сообщено электронным письмом.

**Результаты, поступившие с опозданием, могут быть обработаны со значительной задержкой. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СВОЕВРЕМЕННО!**

С уважением,

АСНП «Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»

<sup>2</sup> Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанных интернет-порталах.

<sup>3</sup> В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соответствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». **Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

<sup>4</sup> При использовании бумажной формы – обведите.

<sup>5</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет может быть направлен на его почтовый адрес.