

# ФСВОК-2019

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## Раздел «КЛИНИЧЕСКАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ»

Цикл 2-19

### ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию контрольных образцов и оформлению результатов

*Уважаемые коллеги!*

Вы получили контрольные образцы<sup>1</sup> и документы для выполнения оценки качества идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам во втором цикле указанного раздела.

До использования храните образцы при 2 - 8 °С в упаковках, в которых вы их получили. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за правильное хранение полученных образцов до их исследования.

**ВНИМАНИЕ! Результаты исследования должны быть представлены к дате, указанной в бланке для представления результатов (приложение 1) и в направленном Вам расписании исследования контрольных образцов.**

#### **ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ**

Образцы предназначены для оценки качества идентификации микроорганизмов и определения их чувствительности к антибиотикам.

**Не создавайте «специальные» условия для исследования контрольных образцов. Исследование контрольных образцов должно быть проведено вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением условий окружающей среды, рекомендованных руководствами по использованию оборудования и реагентов и действующих нормативных требований по безопасности работы в медицинских лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007). Не допускается хранение образцов с поврежденной упаковкой!**

#### **В день исследования:**

1. Извлеките из холодильника образцы и доведите их температуру до комнатной.
2. Вскройте флаконы в асептических условиях и аккуратно, по стенке внесите в них по 0,3-0,4 мл стерильного 0,9% раствора хлорида натрия (физ. раствор).
3. Выполните выделение и идентификацию микроорганизмов, содержащихся в полученных суспензиях.

**Примечание.** При отсутствии роста микроорганизмов проведите 1-2 дополнительных пассажа на соответствующих средах для восстановления жизнеспособности культур.

Для микроорганизма, выделенного из образца «Z», определите чувствительность **только к тем из имеющихся в Вашей лаборатории** антибиотикам, которые указаны в бланке для предоставления результатов.

<sup>1</sup> Изготовлены в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Свойства образцов позволяют осуществить их транспортировку при температуре окружающей среды.

#### **ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**Отправьте полученные результаты через Ваш личный кабинет на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>.**<sup>2,3</sup>

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте соответствие кодов идентифицированных микроорганизмов по Кодификатору (при заполнении электронной формы - выберите нужное наименование из списка слева, нажмите значок «▶», - и выбранное название микроорганизма появится в окне справа. Нажмите «Выбрать», и в таблице отобразится название выбранного Вами микроорганизма).
2. Проверьте наличие и правильность информации о кодах методов, анализаторов, производителей питательных сред и тест-систем/ридеров.
3. При определении чувствительности микроорганизмов к антибиотикам обязательно укажите в таблице не только зону задержки роста, но и определенную чувствительность: S, I или R.
4. Проверьте соответствие внесенной Вами информации нужным ячейкам таблиц.
5. Оцените качество контрольных образцов. В случае неудовлетворительной оценки изложите Ваши замечания, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии) открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Отчет по оценке качества будет размещен в Вашем личном кабинете<sup>4</sup> не позже, чем через две недели после назначенной даты представления результатов, о чем Вам будет сообщено электронным письмом.

**Результаты, поступившие с опозданием, могут быть обработаны со значительной задержкой. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ СВОЕВРЕМЕННО!**

С уважением,

АСНП «Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»

<sup>2</sup> Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанном интернет-портале.

<sup>3</sup> В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соответствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». **Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

<sup>4</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть получен на его электронный или почтовый адрес.