

Бактериологические исследования

**ФСВОК-2020**

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## **ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ**

**(окрашенные и неокрашенные препараты),  
Циклы 1-20 и 2-20**

### **ИНСТРУКЦИЯ**

**по выполнению исследования препаратов и оформлению результатов**

*Уважаемые коллеги!*

Вы получили **два набора** по шесть неокрашенных и два окрашенных препаратов мокроты в каждом цикле.

До и после использования **храните препараты при комнатной температуре**, в темноте, в закрытых контейнерах, в которых Вы их получили. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за правильное хранение полученных препаратов до их исследования.

**ВНИМАНИЕ! Результаты исследований в каждом из циклов должны быть представлены к датам, указанным в бланках для представления результатов (приложения 1) и в направленном Вам расписании исследования контрольных препаратов.**

#### **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ**

Препараты предназначены для оценки качества микроскопического выявления КУМ с окраской по Цилю-Нильсену.

Обращайтесь с препаратами с теми же предосторожностями, что и с любыми клиническими пробами пациентов, содержащими патогенные для человека микроорганизмы, а их исследования выполняйте с соблюдением действующих нормативных требований техники безопасности работы в медицинских лабораториях (Приказ №109 от 21.03.2003 МЗ РФ, ГОСТ Р 52905-2007).

Обращайте особое внимание на работу с предметными стеклами (**Осторожно, стекло!**).

Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством использования оборудования и реагентов в Вашей лаборатории.

**Исследуйте препараты так же, как исследуются рутинные препараты мокроты в Вашей лаборатории.**

**В каждом цикле препараты должны быть исследованы по одному в течение восьми рабочих дней**, в которые Вы будете проводить микроскопию мокроты пациентов с окраской по Цилю-Нильсену. При исследовании *неокрашенного* препарата поместите его среди фиксированных рутинных препаратов мокроты, исследуемых в этот день.

Окрашенные препараты исследуйте одновременно с рутинными окрашенными препаратами.

#### **ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ**

**В каждом из циклов:**

1. **Внесите и отправьте полученные результаты в Вашем личном кабинете** на интернет-портале <http://www.fsvok.ru><sup>1,2</sup>. При заполнении формы следуйте имеющимся в ней указаниям.
2. Оцените качество контрольных препаратов. При неудовлетворительной оценке изложите Ваши замечания по качеству контрольных препаратов, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.
3. Заполнив форму, нажмите кнопку «Отправить».
4. Возвращения препаратов не требуется!

Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете<sup>3</sup> не позже, чем через две недели после назначенной даты представления результатов, о чем Вам будет сообщено электронным письмом.

**Результаты, поступившие с опозданием, могут быть обработаны со значительной задержкой. ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СВОЕВРЕМЕННО!**

С уважением,

АСНП «Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»

<sup>1</sup> Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанном интернет-портале.

<sup>2</sup> В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соответствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». **Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

<sup>3</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет может быть направлен на его почтовый адрес.