

Микроскопические исследования

ФСВОК-2020

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

**ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ,
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ:
T. VAGINALIS В ОТДЕЛЯЕМОМ
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
(окрашенные препараты лаборатории)**

ИНСТРУКЦИЯ

по отбору препаратов и оформлению результатов

Уважаемые коллеги!

В этой посылке Вы получили контейнеры для отправки препаратов Вашей лаборатории для их оценки и повторного исследования. Кроме того, в посылке находится форма для предоставления сведений о препаратах и результатов их исследования (приложение 1, форма 1ТХМ), а также этикетки для маркировки препаратов.

Сохраните гофрокоробку и пузырчатый пакет, в который были упакованы контейнеры, для их повторного использования при отправке препаратов.

Отбор и этикетирование препаратов

1. Отберите из препаратов отделяемого слизистой уrogenитального тракта, приготовленных и исследованных в Вашей лаборатории для выявления трихомонад:

– 7 препаратов, в которых были выявлены трихомонады;

– 3 препарата, в которых трихомонады выявлены не были.

Отобранные препараты должны быть изготовлены и исследованы так же, как обычные препараты в Вашей повседневной работе: теми же специалистами и на тех же микроскопах. Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством использования оборудования и реагентов в Вашей лаборатории. Обращайте особое внимание на работу с предметными стеклами (**Осторожно, стекло!**).

2. Проверьте, удалено ли с препаратов иммерсионное масло, если нет, то накройте их фильтровальной бумагой, смочите ее несколькими каплями ксилола, толуола или этилового спирта и через 2-3 минуты удалите бумагу. Дайте препаратам просохнуть.

3. Наклейте на каждый из отобранных препаратов по одной из присланных этикеток.

Оформление результатов

Внесите и отправьте полученные результаты в Вашем личном кабинете на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>¹: (распечатку заполненной формы или заполненную бумажную форму необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с изготовленными в Вашей

лаборатории препаратами).

При заполнении формы:

1. Внесите в форму 1ТХМ сведения о препаратах, изготовленных в Вашей лаборатории, и результаты выявления в них трихомонад.

2. Внесите в соответствующую ячейку отметку о необходимости возврата препаратов.

3. Подпишите форму, укажите дату ее заполнения.

Упаковка и отправка препаратов

1. Сразу же после исследования препаратов и отправки заполненной формы через личный кабинет вложите препараты в присланные контейнеры, плотно закройте их и заклейте скотчем. Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку скотчем.

2. Позвоните по тел. **(495) 225-50-31** и сообщите оператору, что Вам необходимо вызвать курьера для отправки препаратов в АСНП «ЦВКК».

3. По приезде курьера вложите гофрокоробку с препаратами и заполненной формой в предложенную курьером упаковку.

4. Полученные от Вас препараты² будут переданы экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки качества изготовления препаратов и правильности выявления трихомонад в отделяемом слизистой уrogenитального тракта.

5. Если в форме была сделана соответствующая отметка, то препараты будут возвращены в лабораторию.

6. Результаты экспертного исследования, заключение и рекомендации по повышению качества выполняемых исследований будут размещены в Вашем личном кабинете³.

Результаты, поступившие после окончания действия договора об участии в МСИ, не принимаются!

С уважением,

*АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»*

¹ Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией о работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанном интернет-портале.

² Для данного раздела за дату поступления результатов в АСНП «ЦВКК» принимается дата получения изготовленных в лаборатории препаратов.

³ По запросу заведующего лабораторией отчет может быть направлен на его почтовый адрес.