

Гистологические исследования биологического материала

ФСВОК-2020

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА (контрольные препараты)

ИНСТРУКЦИЯ

по выполнению исследований контрольных препаратов и оформлению результатов

Уважаемые коллеги!

В этой посылке Вы получили набор из 6 контрольных окрашенных гистологических препаратов, подобранных в соответствии с полученными от Вас сведениями о выполняемых гистологических исследованиях, гофрокоробку для последующего возврата препаратов и сопроводительные документы. Сведения о полученных препаратах содержатся в прилагаемом паспорте, в котором приведены коды препаратов, описание материала и краткие клинические данные.

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследуйте препараты сразу после их получения! Полученные препараты следует рассматривать как обычные гистологические препараты, исследуемые в Вашей лаборатории. **Не создавайте специальных условий при исследовании контрольных препаратов – они должны быть исследованы так же, как обычные препараты в Вашей повседневной работе: теми же специалистами и на тех же микроскопах.**

Соблюдайте условия окружающей среды, рекомендованные руководством по использованию оборудования и реагентов в Вашей лаборатории. Проводите исследования с соблюдением требований безопасности работы в медицинских лабораториях (ГОСТ Р 52905-2007). Обращайте особое внимание на работу с предметными стеклами (**Осторожно, стекло!**).

Контрольные препараты защищены хрупким покровным стеклом и будут повторно использованы в других лабораториях. Обращайтесь с препаратами аккуратно, не загрязняя и не царапая их поверхность (будьте особенно внимательны при переходе на большое увеличение при использовании иммерсионного объектива).

Исследовав очередной препарат, удалите с него остатки иммерсионного масла (например, протерев мягкой чистой тканью, смоченной спиртом) и аккуратно поместите в пластиковый футляр.

Сохраняйте контрольные препараты в футлярах при комнатной температуре до получения инструкций по возврату препаратов в Центр внешнего контроля.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Внесите и отправьте полученные результаты в Вашем личном кабинете на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>^{1,2}.

¹ Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией

При заполнении формы:

1. Внесите код препаратов (как буквы, так и цифры) и установленные Вами гистологические диагнозы в соответствующие графы формы 1 Гист.
2. Оцените качество препаратов. При неудовлетворительной оценке изложите Ваши замечания по качеству препаратов, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Полученные от Вас результаты будут переданы экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности гистологического диагноза и точности его формулировки. Одновременно с передачей результатов экспертам в Ваш личный кабинет будут помещены инструкция по возврату препаратов и предварительный отчет³, содержащий экспертные диагнозы для препаратов.

В течение двух недель после отправки результатов в Ваш личный кабинет будет помещен отчет по оценке их качества, о чем Вы будете уведомлены электронным письмом. Если Вы не обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, сообщите об этом!³

Результаты, поступившие после окончания действия договора/контракта об участии в МСИ, не принимаются!

При наличии расхождений в Ваших и экспертных диагнозах Вы сможете повторно просмотреть препараты для изучения причин таких расхождений. После этого контрольные препараты необходимо будет вернуть в АСНП «ЦВКК», руководствуясь полученной Вами инструкцией.

С уважением,

АСНП «Центр внешнего контроля качества
клинических лабораторных исследований»

по работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанном интернет-портале.

² В отсутствие доступа к сети Интернет заполните соответствующую бумажную форму и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК». **Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

³ По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества, инструкция по возврату и предварительный отчет могут быть получены на его электронный или почтовый адрес.