

*Цит ологические исследования биологического мат ериала*

**ФСВОК-2020**

*Программа межлабораторных  
сличительных испытаний*

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
с использованием цифровых фотографий<sup>1</sup>**

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по исследованию цифровых фотографий и оформлению результатов**

*Уважаемые коллеги!*

Вы получили USB-флеш-накопитель и документы для **трех циклов** оценки качества цитологической диагностики с использованием цифровых микрофотографий. USB-флеш-накопитель содержит цифровые фотографии окрашенных цитологических препаратов соответствующей локализации, представленные в виде файлов формата «ppt» (2 файла в каждом из трех циклов раздела), каждый файл содержит 6 цифровых фотографий. Файлы также содержат краткие клинические данные о пациенте, сведения о характере материала, способе окрашивания препарата и использованном увеличении.

Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.

**ВНИМАНИЕ! ИССЛЕДУЙТЕ ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ через равные промежутки времени в сроки, указанные в бланках для представления результатов (приложения 1) и направленном Вам расписании анализа контрольных образцов.**

1. В выбранный Вами день вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку заказанного Вами раздела, введите пароль, указанный в форме представления результатов, и откройте папку с имеющимися цифровыми фотографиями биологического материала. Проанализируйте цифровые фотографии соответствующего цикла. Для этого:

2. Скопируйте файлы на жесткий диск компьютера, откройте их в программе Microsoft PowerPoint, включите режим «показ слайдов».

3. Ознакомьтесь со сведениями о цитологических препаратах, просмотрите их цифровые фотографии и установите соответствующие цитологические диагнозы. Исследование цифровых фотографий на экране компьютера необходимо провести как рутинное микроскопическое исследование, имитирующее анализ обычных проб пациентов.

4. **Внесите и отправьте полученные результаты в Вашем личном кабинете на интернет-портале <http://www.fsvok.ru><sup>2,3</sup>.**

При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

4.1. Внесите установленные Вами цитологические диагнозы в той форме, которая принята в Вашей лаборатории.

4.2. Оцените качество цифровых фотографий. В случае неудовлетворительной оценки изложите Ваши замечания по качеству фотографий, а также предложения по совершенствованию данного раздела (при их наличии), открыв закладку «Сообщение/вопрос специалисту АСНП «ЦВКК» на рабочем столе Вашего личного кабинета, или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Присланные Вами формы будут проверены экспертам МСИ «ФСВОК» для оценки правильности и точности формулировки установленных диагнозов.

Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется!

В течение двух недель после отправки результатов в Ваш личный кабинет будет помещен отчет по оценке их качества, о чем Вы будете уведомлены электронным письмом. Если Вы не обнаружите отчет в Вашем личном кабинете, сообщите об этом!<sup>4</sup>

*С уважением,*

*АСНП «Центр внешнего контроля качества  
клинических лабораторных исследований»*

диагноза при исследовании выпотных жидкостей, мокроты и материала бронхоскопии).

<sup>2</sup> Созданы для каждого участника МСИ. С инструкцией по работе в личном кабинете можно ознакомиться на указанном интернет-портале.

<sup>3</sup> При невозможности отправки результатов через портал заполните бумажную форму с соответствующим (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла и отправьте ее почтой по указанному выше адресу АСНП «ЦВКК».

**Не дублируйте отправку результатов разными способами!**

<sup>4</sup> По запросу заведующего лабораторией отчет по оценке качества может быть направлен на его почтовый адрес.

<sup>1</sup> Разделы с каталожными номерами 108, 109, 110, 111, 112 и 113 (оценка цитологического диагноза при заболеваниях шейки матки, желудка, щитовидной железы и молочной железы; оценка цитологического