

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Гематологические исследования

ФСВОК-2021Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ-10**

Циклы 1-21, 2-21

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования в двух циклах Вы получили:

- Образцы для проверки качества (ОПК) определения гематологических показателей с использованием любых гематологических анализаторов, кроме «Advia-120/2120» и «Cell-Dyn Ruby», представленные имитантами крови человека и изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.


Внимание!

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК

- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В день исследования ОПК текущего цикла:**

1. Извлеките из холодильника упаковку с обоими ОПК. Выдержите их при комнатной температуре в течение 15-25 мин.

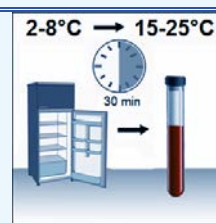


2. Перемешайте содержимое флаконов, плавно вращая пробирку между ладонями в течение 20-30 секунд в вертикальном положении.



3. Переверните пробирку и снова вращайте 8 раз, после этого осторожно переверните пробирку 8 раз.




Не встряхивайте резко и не используйте механические лабораторные миксеры.

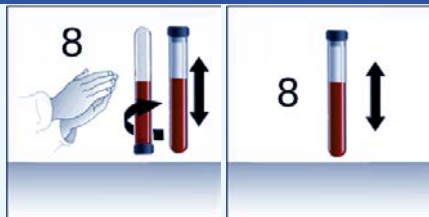

4. Убедитесь в гомогенности полученной суспензии. Если Ваш анализатор имеет встроенный миксер, предварительно проведите перемешивание образцов в соответствии с вышеуказанной процедурой (п.2).

5. Непосредственно перед измерением повторно плавно переверните пробирку вверх-вниз 8-10 раз.

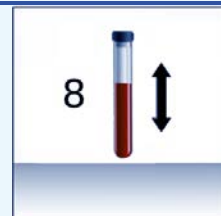

6. Проведите по два определения гематологических показателей в каждом ОПК

Оформление результатов

Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.

➤ Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте, что все результаты выражены в указанных в форме единицах измерения.

2. В таблицу «Сведения об аналитической системе» в соответствии с Кодификатором внесите коды анализатора и производителя реагентов, использованных при анализе ОПК. Если коды в Кодификаторе отсутствуют, укажите код **99** и сведения о них в соответствующих таблицах формы.

3. В столбцы с номерами ОПК и буквенными индексами впишите результаты исследований соответствующих образцов в указанных единицах измерения. При внесении значений полученных результатов приводите предусмотренное формой количество десятичных знаков после запятой.

Показатель	Единица измерения	Значение	Страна
WBC	10 ⁹ /л	123	123
WBCP	Percent, 10 ⁹ /л	123	123
PLT	10 ⁹ /л	123	123

4. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО

- удовлетворительная

- неудовлетворительная

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.