


АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

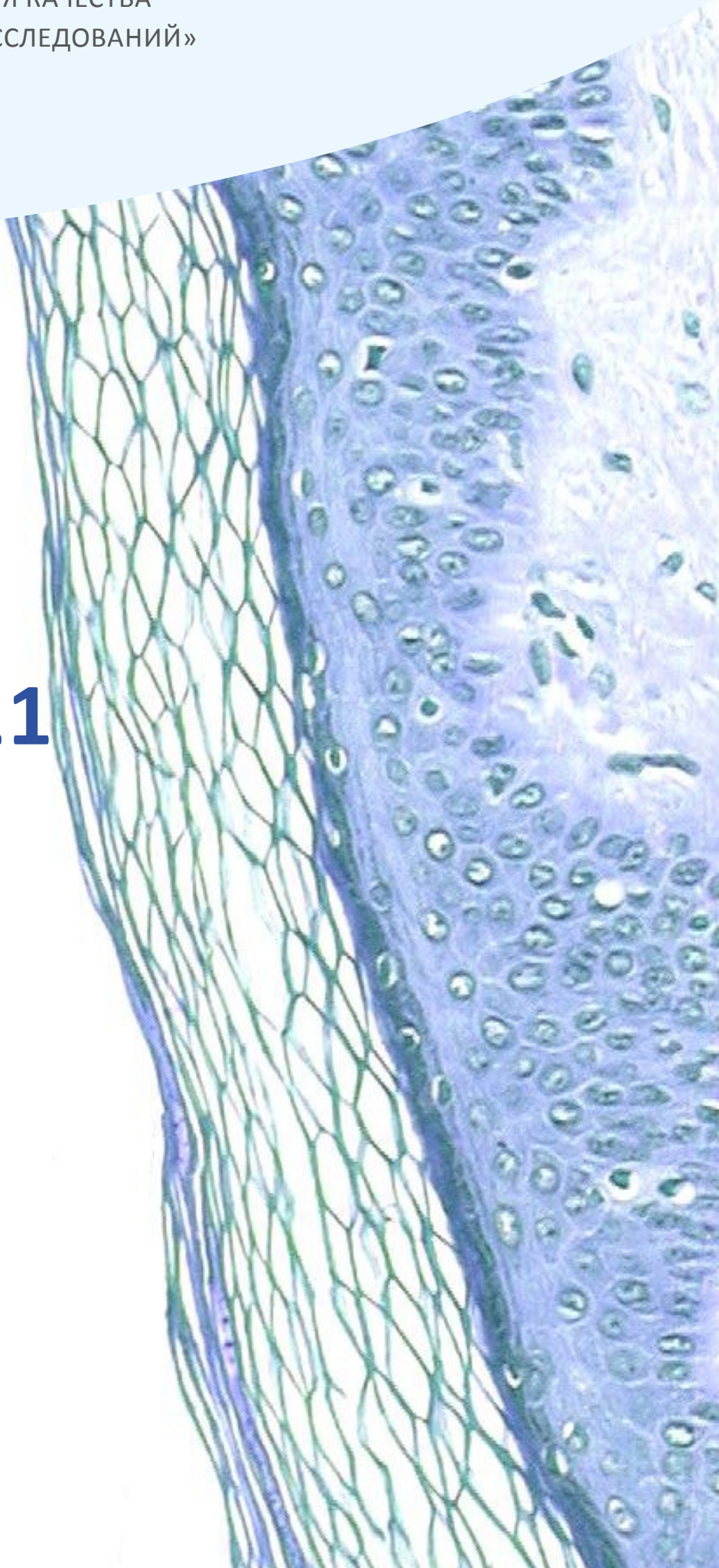

Гистологические исследования биологического материала

ФСВОК-2021Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА
(контрольные препараты)****ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по данному разделу Вы получили:

- Набор из 6 ОПК (образцов для проверки качества исследований), представляющих собой окрашенные гистологические препараты, в пластиковых контейнерах.
- Гофрокоробку для последующего возврата образцов.
- Паспорт, в котором приведены коды ОПК, описание материала, краткие клинические данные.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

Внимание!

- ОПК снабжены хрупкими покровными стеклами!
- При работе с ОПК не допускайте загрязнений, механических повреждений!
- **ОПК являются собственностью АСНП «ЦВКК» и предоставляются на пять недель**, после чего, независимо от наличия предоставленных Вами результатов исследований, они должны быть возвращены.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПКИсследование
ОПК сразу по
получении

- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК.
- **ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОПК** по стандартной методике с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- После завершения исследования каждого ОПК удалите остатки иммерсионного масла и аккуратно поместите ОПК в пластиковые контейнеры.
- Сохраняйте ОПК в контейнерах при комнатной температуре, избегайте попадания прямых солнечных лучей.

**Оформление результатов**Внесение
результатов**Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**

- Заполните форму, следуя имеющимся на ней указаниям.
 - **Заполнение бумажной формы осуществляется только ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.



¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.



Получение отчета



Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в личном кабинете не позже, чем через две недели после получения Ваших результатов.



Повторный
просмотр ОПК
5 рабочих дней

- После получения отчета Вам предоставляется возможность в течение **пяти рабочих дней** повторно просмотреть ОПК для сверки Ваших гистологических диагнозов с экспертными.



Возврат ОПК



Возврат ОПК

- После повторного просмотра подготовьте ОПК к возврату:
 - Вложите ОПК в контейнеры, заклейте их скотчем.
 - Поместите контейнеры в пузырчатый пакет и вложите его в полученную от АСНП «ЦВКК» гофрокоробку. Заклейте гофрокоробку скотчем.
 - Позвоните в АСНП «ЦВКК» по телефону (495) 225-50-31 и сообщите номер участника МСИ «ФСВОК», дату и время, удобное для приезда представителя курьерской службы, контактное лицо со стороны Вашей организации и его номер телефона.
 - В установленное время и дату к Вам будет направлен курьер. Передайте курьеру упакованные согласно инструкции ОПК.
 - **Просим вас осуществлять возврат ОПК только через курьера.** В случае вопросов при возврате ОПК обращайтесь в АСНП «ЦВКК».