


АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

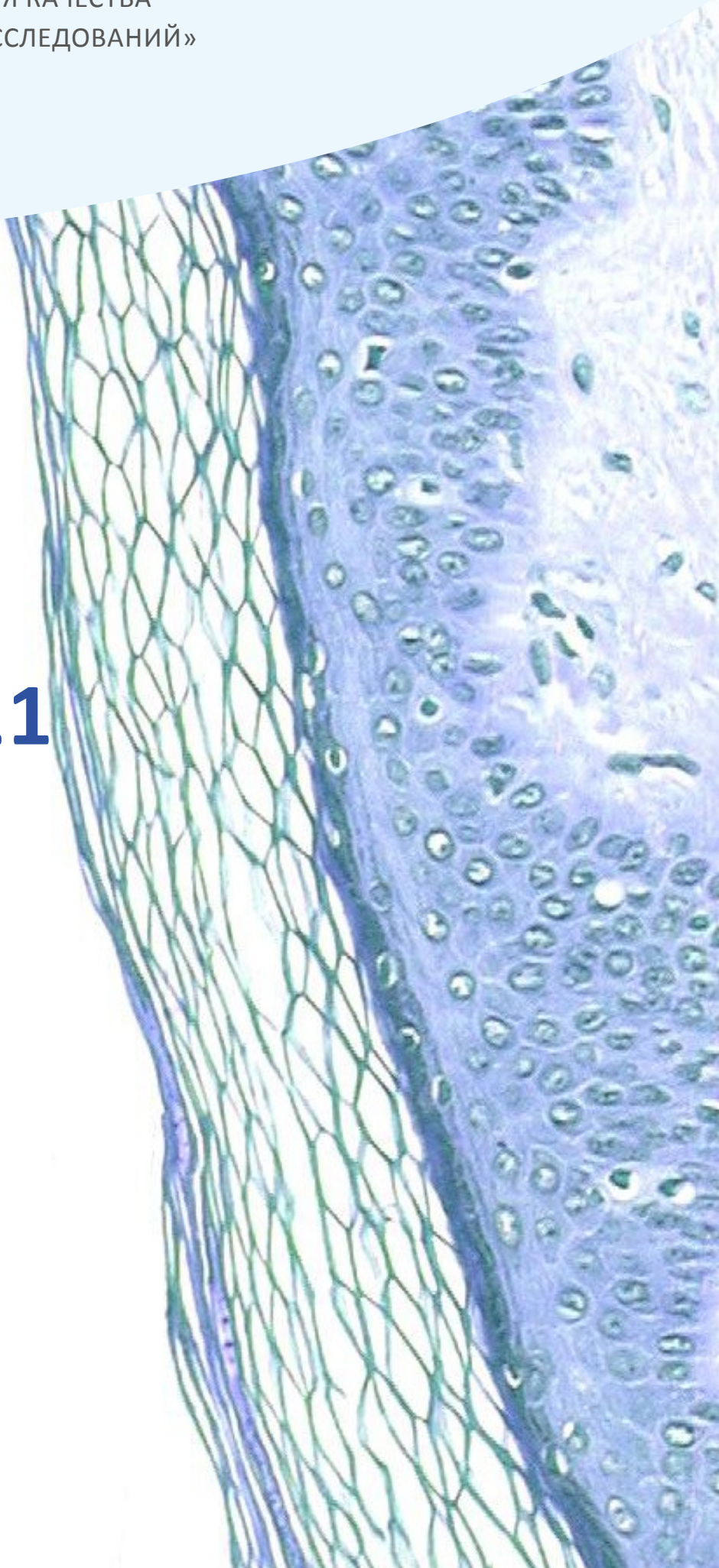

Гистологические исследования биологического материала

ФСВОК-2021

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ¹

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в одном цикле Вы получили:

- USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) гистологических исследований. Для каждого раздела USB-флеш-накопитель содержит 4 ОПК, изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.**
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Перед исследованием необходимо установить программу для просмотра виртуальных препаратов OlyVIA, если ранее она не была установлена на Ваш компьютер.
 1. Для этого пройдите по ссылке:
<https://www.olympus-lifescience.com/en/support/downloads/#!dlOpen=%23detail847252030>.
 2. Выберите версию программы для скачивания: OlyVIA Ver.2.9.1 или OlyVIA Ver.2.9 (нажав на Virtual Slide Microscopes (VS120)), нажмите Download.
 3. Для установки требуется пройти регистрацию на сайте www.olympus-lifescience.com. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера и откройте имеющиеся на нем виртуальные препараты.
- Ознакомьтесь со сведениями о гистологических виртуальных препаратах. Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК на экране компьютера, его необходимо провести как рутинное гистологическое исследование, имитирующее анализ обычных проб пациентов.
- Исследуйте полученные ОПК на экране компьютера, меняя по необходимости увеличение и область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет четким). Установите соответствующие гистологические диагнозы.

Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете² – это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для представления результатов, **следуя имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в личном кабинете не позже, чем через две недели после получения Ваших результатов.

¹ Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 422 – 425.

² При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.