

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Микроскопические исследования

ФСВОК-2021Программа межлабораторных
сличительных испытаний**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ
(подсчет лейкоцитарной формулы
в виртуальных мазках крови)**

Циклы 1-21 и 2-21

ИНСТРУКЦИЯ**по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель, содержащий 8 виртуальных окрашенных препаратов крови человека – образцов для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований лейкоцитарной формулы, морфологии эритроцитов и подсчета нормобластов, изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл **«Краткое руководство пользователя»**, ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, проводите исследование, имитируя на экране компьютера выполняемые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования. Просмотр проводите, меняя увеличение, как описано в Кратком руководстве пользователя.
- Анализируйте ОПК с учетом приведенных для них клинических данных.

Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов с **нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Если ОПК не содержит нормобласты, **внесите цифру «0»**. Если Вы отнесли часть клеток в строку **«Другие лейкоциты»**, назовите их.
- Если эритроциты в ОПК не имеют морфологических особенностей, при заполнении результатов исследования морфологии эритроцитов **внесите цифру «1»**.
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.