

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая: Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Гематологические исследования

**ФСВОК-2021**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОСТАЗА:  
КОАГУЛОЛОГИЯ-1****Цикл 3-21****ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» в третьем цикле Вы получили:

- Лиофилизированные образцы для проверки качества (ОПК) коагулологических исследований, изготовленные из плазмы крови человека в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в клиничко-диагностических лабораториях.
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

**Внимание!**

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанной в календаре датой!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

**Исследование ОПК**


- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В первый день исследования ОПК текущего цикла:**

**1. Извлеките из холодильника ОПК с номером цикла 3-21 (ПРОВЕРЬТЕ!). Возьмите ОПК с буквенным индексом К, доведите температуру ОПК до комнатной.**


2-8°C → 15-25°C




**2. ОПК с буквенным индексом L верните в холодильник.**

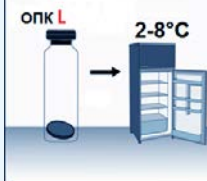

3. Сбейте с внутренней стороны пробки частицы сухого вещества (при их наличии), вскройте флакон. Избегайте потери лиофилизата, кладите пробку на стол внешней стороной, не встряхивайте ее. Пипеткой **высокого класса точности** добавьте (**по стенке**) во флакон **1,0 мл** дистиллированной воды комнатной температуры.

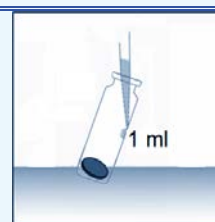

4. Закройте флакон снятой с него пробкой, оставьте стоять в течение **15 мин** при комнатной температуре, периодически переворачивая, не взбалтывая!

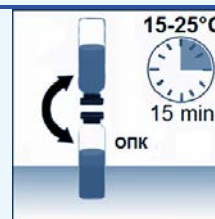

5. Проведите по два определения показателей в ОПК в течение 2-х часов после растворения лиофилизата.

➤ На следующий день исследуйте ОПК с буквенным индексом L, повторяя пп. 1, 3-5.

### Оформление результатов

Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>1</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.

➤ Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте, что все результаты выражены в **указанных в форме единицах измерения**.

2. Внесите **коды составляющих аналитических систем**, даты исследования ОПК и полученные результаты со всеми значащими разрядами.

3. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО  
 - удовлетворительная  
 - неудовлетворительная

➤ Если в 100 аналитических сериях или в течение 6 мес. текущего года Вами использовался один и тот же лот образцов для внутрिलाбораторного контроля, **Вы можете получить интегральную оценку этих серий по параметрам «сигмаметрии»**. Для этого в цикле 3-21 заполните страницу формы, содержащую запрос о параметрах карты внутрिलाбораторного контроля.

### Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

<sup>1</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.