

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. КОСТНЫЙ МОЗГ.

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Цитогенетические исследования. Биологические материалы. Костный мозг.

# ФСВОК-2021

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА**  
(препараты лимфоцитов лаборатории)

## ИНСТРУКЦИЯ

**по подготовке образцов для проверки качества, оформлению и отправке результатов их исследования для экспертной оценки**

### Общие положения

Вы получили:

- Контейнеры для отправки на оценку экспертам МСИ «ФСВОК» препаратов Вашей лаборатории (образцов для проверки качества исследований (ОПК)), упакованные в пузырчатый пакет и гофрокоробку. **Сохраните упаковку** для отправки препаратов.
- Этикетки для маркировки ОПК.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

### Отбор и исследование ОПК

- **Внимание! СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ НАЧНИТЕ ОТБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПК лимфоцитов периферической крови, окрашенных с использованием метода G-дифференциальной окраски.**
- Не создавайте «специальные» условия для изготовления и исследования ОПК, используйте стандартную методику с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- Отберите:
  - **1 препарат** метафазных пластинок с нормальным кариотипом;
  - **2 препарата**, содержащие структурные перестройки, аномалии числа хромосом, комплексные перестройки.
- После исследования удалите с ОПК иммерсионное масло, просушите их.
- Наклейте на каждый ОПК по одной из присланных этикеток.
- Сохраняйте ОПК при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей, до отправки их в АСНП «ЦВКК».

### Оформление результатов

- **Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете.**
- Распечатайте заполненную форму (при бумажном документообороте заполните форму): ее необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с ОПК.
- **При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- При необходимости возврата ОПК отметьте соответствующую ячейку.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

### Упаковка и отправка ОПК

- Вложите отобранные ОПК в присланные контейнеры, заклейте их скотчем. Контейнеры поместите в пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку скотчем.
- Позвоните по тел. **(495) 225-50-31** и сообщите оператору о необходимости вызова курьера (курьерская доставка входит в стоимость раздела).
- Передайте курьеру упакованные согласно инструкции ОПК в назначенные время и дату.

### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через четыре недели после получения изготовленных в лаборатории ОПК с заполненной формой для результатов.