

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. КОСТНЫЙ МОЗГ.

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Цитогенетические исследования. Биологические материалы. Костный мозг.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии препаратов лимфоцитов)

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- Фотографии¹ метафазных пластинок в лимфоцитах периферической крови, окрашенных красителем Гимза (GTG) - образцы для проверки качества (ОПК) цитогенетических исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется.
- Возвращения фотографий не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК. Исследование цифровых фотографий на экране компьютера необходимо провести как рутинное исследование (или имитацию рутинного исследования) обычных проб пациентов по принятой в лаборатории методике (для исследований ОПК на USB-флеш-накопителе: вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела, **введите пароль**, указанный в форме для результатов и откройте файлы).
- Анализируйте фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете² - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов. **При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Ваши цитогенетические диагнозы будут сопоставлены с диагнозами, установленными экспертами МСИ «ФСВОК».
- Отчет по оценке качества выполненных исследований, содержащий комментарии экспертов по предоставленным Вами цитогенетическим диагнозам и заключениям, будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три недели после предоставления результатов.

¹ По разделу МСИ «ФСВОК» с каталожным номером 465 фотографии выложены в личном кабинете; с каталожным номером 102 - предоставлены на USB-флеш-накопителе.

² При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.