

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. КОСТНЫЙ МОЗГ.

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Цитогенетические исследования. Биологические материалы. Костный мозг.

# ФСВОК-2021

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

**ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
МЕТОДОМ FISH  
(цифровые фотографии)**

## ИНСТРУКЦИЯ

### по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

#### Общие положения

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- Фотографии<sup>1</sup> препаратов костного мозга при флуоресцентной микроскопии - образцы для проверки качества (ОПК) цитогенетических исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется.

#### Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **в указанные в календаре сроки!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК. Исследование цифровых фотографий на экране компьютера необходимо провести как рутинное исследование (или имитацию рутинного исследования) обычных проб пациентов по принятой в лаборатории методике (для исследований ОПК на USB-флеш-накопителе: вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела, **введите пароль**, указанный в форме для результатов и откройте файлы).
- Анализируйте фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

#### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов. **При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

#### Получение отчета

- Ваши цитогенетические диагнозы будут сопоставлены с диагнозами, установленными экспертами МСИ «ФСВОК».
- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три недели после предоставления результатов.

<sup>1</sup> По разделу МСИ «ФСВОК» с каталожным номером 464 фотографии выложены в личном кабинете; с каталожным номером 411, - предоставлены на USB-флеш накопителе.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.