

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая: Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Биохимические исследования крови

ФСВОК-2021Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ОНКОМАРКЕРЫ СА125 И ОБЩИЙ ПСА****Циклы 1-21, 2-21, 3-21****ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования в трех циклах Вы получили:

- Лиофилизированные образцы для проверки качества (ОПК) исследований на определение концентрации онкомаркеров, изготовленные из сыворотки крови человека в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в клинико-диагностических лабораториях.
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

Внимание!

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК


- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В день исследования ОПК текущего цикла:**

1. Возьмите упаковку с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла, доведите температуру ОПК до комнатной.


2-8°C → 15-25°C




2. Сбейте с внутренней стороны пробки частицы сухого вещества (при их наличии), вскройте флаконы. Избегайте потери лиофилизата, кладите пробки на стол внешней стороной, не встряхивайте их. Пипеткой **высокого класса точности добавьте (**по стенке**) в каждый из флаконов **1,0 мл** дистиллированной воды комнатной температуры.**

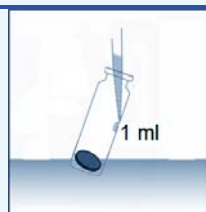

3. Закройте каждый флакон снятой с него пробкой, оставьте стоять в течение **30 мин** при комнатной температуре, периодически переворачивая, не взбалтывая!

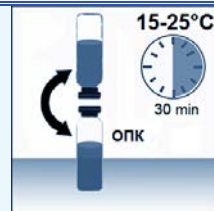

4. Проведите по два определения показателей в каждом ОПК в день растворения лиофилизатов, в крайнем случае, в течение **3 суток** при температуре **2 - 8°C**.

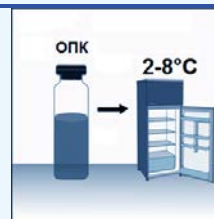

Оформление результатов

Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.

➤ Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте, что все результаты выражены в указанных в форме единицах измерения.

2. Внесите коды составляющих аналитических систем и полученные результаты со всеми значащими разрядами.

АСНП «ЦВКК»		Биомедицинский экспертный центр	
Федеральное государственное учреждение «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований»		ФСВОК	
Адрес: 129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2		ЛАБОРАТОРИЯ №	
Телефон: (495) 225-5031		Содержит аналитические системы, подлежащие оценке, в отлитых флаконах	
E-mail: labs@fsvok.ru		Коды*	
Сайт: www.fsvok.ru			
Сфера деятельности		Коды	
1. Анализ биоматериалов			
2. Клиническая диагностика			
3. Клиническое исследование			
4. Клиническое исследование			
5. Клиническое исследование			
Поставитель	проектный номер	анализатор	
СА 125	71	120	
ПСА			

3. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО
 - удовлетворительная
 - неудовлетворительная

➤ Если в 100 аналитических сериях или в течение 6 мес. текущего года Вами использовался один и тот же лот образцов для внутрилабораторного контроля, **Вы можете получить интегральную оценку этих серий по параметрам «сигмаметрии»**. Для этого в цикле 3-21 заполните страницу формы, содержащую запрос о параметрах карты внутрилабораторного контроля.

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.