

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Бактериологические исследования

ФСВОК-2021Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ВЫЯВЛЕНИЕ КУМ В ПРЕПАРАТАХ МОКРОТЫ
МИКРОСКОПИЕЙ ПО ЦИЛЮ-НИЛЬСЕНУ**
(окрашенные и неокрашенные препараты)

Циклы 1-21 и 2-21

ИНСТРУКЦИЯ**по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» в двух циклах Вы получили:

- Два набора по восемь (два окрашенных и шесть неокрашенных) образцов для проверки качества (ОПК) бактериологических исследований с помощью микроскопии, изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». ОПК пригодны для транспортировки при температуре окружающей среды.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов, последние предоставляются дополнительно.
- ОПК следует хранить при комнатной температуре, в темноте, в закрытых контейнерах, в которых Вы их получили. **Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- Возвращения ОПК не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- ОПК предназначены для оценки качества микроскопического выявления КУМ с окраской по Цилю-Нильсену.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК. Обращайтесь с препаратами с теми же предосторожностями, что и с любыми клиническими пробами пациентов, содержащими патогенные для человека микроорганизмы, а их исследования выполняйте с соблюдением действующих нормативных требований техники безопасности работы в медицинских лабораториях (Приказ №109 от 21.03.2003 МЗ РФ, ГОСТ Р 52905-2007).
- Обращайте особое внимание на работу с предметными стеклами (**Осторожно, стекло!**).
- **В каждом цикле исследуйте ОПК по одному в течение восьми рабочих дней.** При исследовании неокрашенного ОПК поместите его среди фиксированных рутинных препаратов мокроты, исследуемых в этот день. Окрашенные ОПК исследуйте одновременно с рутинными окрашенными препаратами.

Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов с нужным (**ПРОВЕРЬТЕ!**) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.