

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Микроскопические исследования

**ФСВОК-2021**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ****осадка мочи, кала,  
возбудителей малярии в крови,  
отделяемого мочеполовых органов  
(виртуальные препараты)<sup>1</sup>****Циклы 1-21 и 2-21**

## ИНСТРУКЦИЯ

### по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

#### Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в обоих циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований. Для каждого раздела USB-флеш-накопитель содержит 8 ОПК (по 4 для каждого цикла), изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

#### Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл **«Краткое руководство пользователя»**, ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие в виртуальных препаратах объекты, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования. Просмотр проводите, меняя увеличение и, при необходимости, фокусировку, как описано в Кратком руководстве пользователя.
- Анализируйте ОПК с учетом приведенных для них клинических данных (если указаны).

#### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Отметьте выявленные Вами объекты. Если выявленные объекты не представлены в форме, приведите их в ячейках «Другое».
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

#### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

<sup>1</sup> Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 070, 081, 083, 085, 090, 091.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.