

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Микроскопические исследования

**ФСВОК-2021**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**  
*осадка мочи, спинномозговой жидкости, кала,  
мокроты, эякулята, отделяемого мочеполовых  
органов, патогенных грибов  
(фотографии)***Циклы 1-21, 2-21 и 3-21**

## ИНСТРУКЦИЯ

### по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

#### Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» во всех трех циклах Вы получили:

- Цветные фотографии<sup>1</sup> микроскопических полей зрения препаратов биологического материала человека - образцы для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется.
- Возвращения фотографий не требуется.

#### Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие на фотографиях элементы, имитируя проводимые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования.
- Анализируйте фотографии с учетом приведенных для них клинических данных (если указаны).

#### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Отметьте выявленные Вами элементы. Если выявленные элементы не представлены в форме, приведите их в ячейках «Другие».
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

#### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

<sup>1</sup> По разделам МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 440, 445, 447, 449, 451, 453, 455, 457, 459 фотографии выложены в личном кабинете; с каталожными номерами 082, 084, 086, 087, 092, 093, 094, 096, 132, - предоставлены на бумажном носителе.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.