

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Микроскопические исследования яйцеклеток  
и эмбрионов. Клиническая эмбриология

# ФСВОК-2021

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ  
РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ  
(цифровые фотографии)**

**Циклы 1-21, 2-21 и 3-21**

## ИНСТРУКЦИЯ

**по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов**

### Общие положения

Для работы во всех циклах указанного раздела МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- USB-флеш-накопитель с цифровыми препаратами биологических материалов человека - образцами для проверки качества исследований (ОПК), изготовленными в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Для указанного раздела ОПК представлены 12 цифровыми фотографиями нативных ооцитов и эмбрионов человека (по 4 для каждого цикла).
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

### Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела, **введите пароль**, указанный в форме для результатов и откройте TIF-файлы нужного цикла.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие в препаратах объекты, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования.
- Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>1</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов **с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Отметьте выявленные Вами объекты. Если выявленные объекты в форме не представлены, приведите их в ячейках «Другое».
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

<sup>1</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.