

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Микроскопические исследования

**ФСВОК-2021**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ЛЕЙКОЦИТОВ И ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ  
ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
(подсчет лейкоцитарной формулы  
в мазках крови)**

Цикл 2-21

**ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» во втором цикле Вы получили:

- Образцы для проверки качества (ОПК) микроскопических исследований лейкоцитарной формулы, морфологии эритроцитов и подсчета нормобластов, изготовленные из крови человека в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в клинико-диагностических лабораториях.
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Исследованные ОПК сохраняйте в футляре до получения оценки качества выполненных исследований.

**Внимание!**

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

**Исследование ОПК**

- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности». Обращайте особое внимание на работу с предметными стеклами (**Осторожно, стекло!**).
- **Исследуйте по одному ОПК в течение 4-х последовательных дней**, в которые Вы будете исследовать рутинные препараты крови.
- В день исследования извлеките **один ОПК** из холодильника и доведите его температуру до комнатной.
- **Поместите ОПК среди рутинных препаратов, проведите его фиксацию и окраску, подсчитайте лейкоцитарную формулу и нормобласты (на 100 лейкоцитов), исследуйте морфологию эритроцитов.**
- Анализируйте ОПК с учетом приведенных для них клинических данных.

**Оформление результатов**

- **Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>1</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов с **нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Если ОПК не содержит нормобласты, **внесите цифру «0»**. Если Вы отнесли часть клеток в строку «**Другие лейкоциты**», назовите их.
- Если эритроциты в ОПК не имеют морфологических особенностей, при заполнении результатов исследования морфологии эритроцитов **внесите цифру «1»**.

<sup>1</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.

- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

#### **Получение отчета**

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.