

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)



Цитологические исследования биологического материала

**ФСВОК-2022**

*Программа межлабораторных  
сличительных испытаний*

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ<sup>1</sup>**

## ИНСТРУКЦИЯ

**по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов**

### Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в одном цикле Вы получили:

- USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) цитологических исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

### Исследование ОПК

- **Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.**
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл **«Vision Slide Viewer\_05.2019\_quick guide\_ru»**, ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Ознакомьтесь со сведениями о цитологических виртуальных препаратах в форме для представления результатов. Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК на экране компьютера, его необходимо провести как рутинное цитологическое исследование, имитирующее анализ обычных проб пациентов.
- Исследуйте полученные ОПК на экране компьютера, меняя по необходимости увеличение и область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет четким). Установите соответствующие цитологические диагнозы.

### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> – это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для представления результатов, **следуя имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после даты получения результатов.

<sup>1</sup> Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 105 – 107, 135. Для разделов с каталожными номерами 105 – 107 USB-флеш-накопитель содержит 4 ОПК, для раздела 135 – 5 ОПК.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.