

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая: Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Гематологические исследования

ФСВОК-2022Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ГЕМОЦИТОМЕТРИЯ 5-diff**
(Abbott, Advia, Coulter,
Mindray, Pentra, Sysmex)**ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования в цикле Вы получили:

- Образцы для проверки качества (ОПК) определения гематологических показателей с использованием гематологических анализаторов, дифференцирующих лейкоциты на пять популяций, перечисленных в описании к программе МСИ, представленные имитантами крови человека и изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

Внимание!

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.


Исследование ОПК

- Проводите исследование с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В день исследования ОПК текущего цикла:**


ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ! Перед началом измерений необходимо в ручном режиме, используя опции меню, перевести Ваш анализатор из режима измерения пробы пациента в режим контроля качества.

При затруднении при переводе анализатора в режим контроля качества обратитесь к сервисному инженеру.

С целью стандартизации процесса измерения проводите забор пробы из флакона в ручном режиме с предварительно снятой с него крышкой, **избегая использования автосемплера и автоматического прокалывания крышки.**

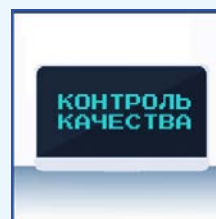

1. Извлеките из холодильника упаковку с обоими ОПК. Выдержите их при комнатной температуре в течение 15 - 25 мин.

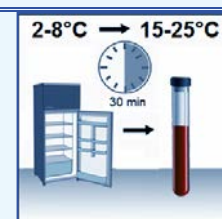

4. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО
 - удовлетворительная
 - неудовлетворительная

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.