

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Цитологические исследования биологического материала

# ФСВОК-2022

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ<sup>1</sup>

### ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

#### Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в одном цикле Вы получили:

- USB-флеш-накопитель, содержащий 3 цифровых препарата биологических материалов человека – образцы для проверки качества исследований (ОПК), изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Каждый ОПК содержит 6 цифровых фотографий и краткие клинические данные о пациенте, сведения о характере материала, способе окрашивания и использованном увеличении.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

#### Исследование ОПК

- **Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.**
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела, откройте ppt-файлы и введите **пароль**, указанный в форме для представления результатов. Включите режим «показ слайдов».

- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные цитологические исследования.
- Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

#### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов. **При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**

<sup>1</sup> Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 412, 474, 475, 419, 136.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.

➤ Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества ОПК

- удовлетворительная

- неудовлетворительная

### Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после предоставления результатов.