


АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

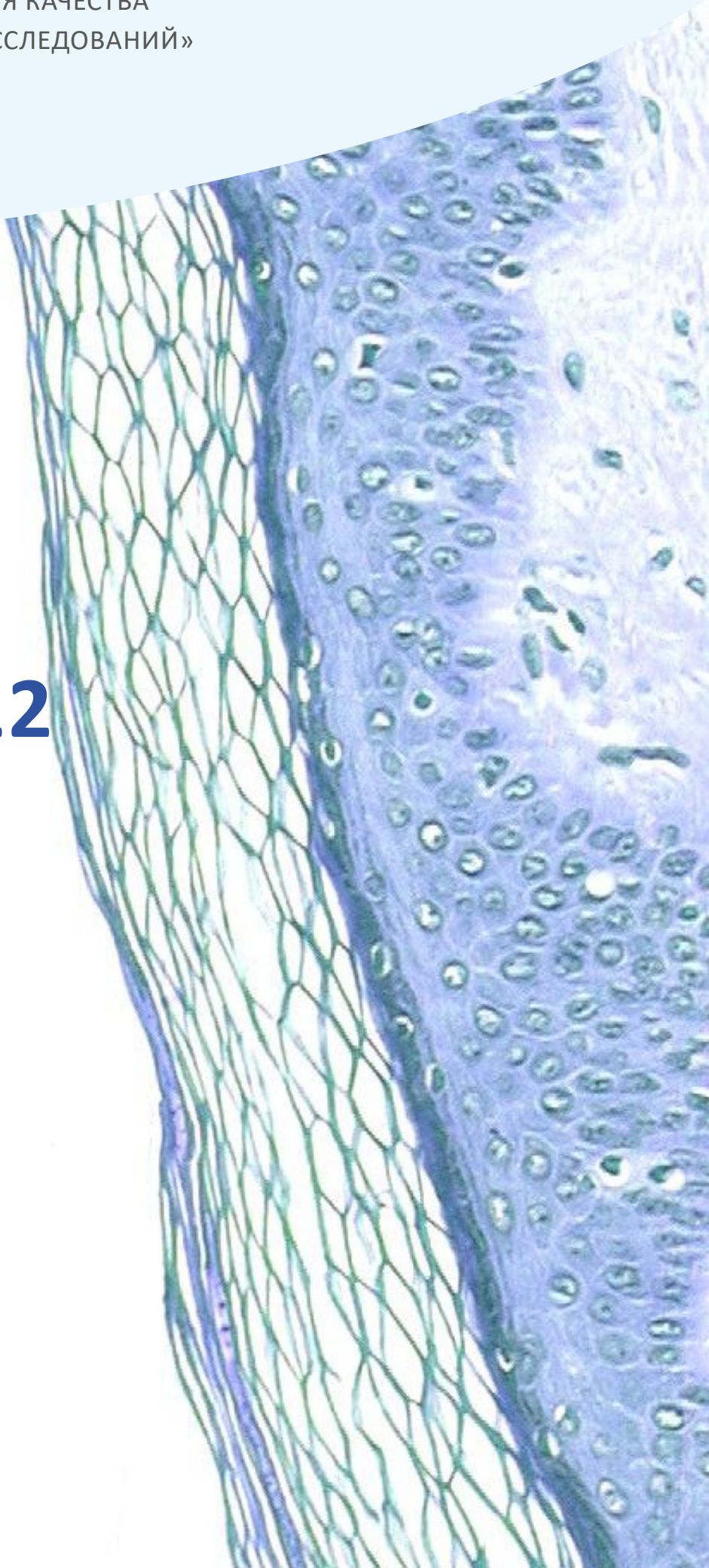

Гистологические исследования биологического материала

**ФСВОК-2022**

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

**ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ  
ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ<sup>1</sup>**

## ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

### Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в одном цикле Вы получили:

- USB-флеш-накопитель(и), содержащий(ие) виртуальные препараты биологического материала человека – образцы для проверки качества (ОПК) гистологических исследований. Для каждого раздела USB-флеш-накопитель содержит 4 ОПК, изготовленных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

### Исследование ОПК

- **Внимание! ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после получения.**
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, откройте файл **«Vision Slide Viewer\_05.2019\_quick\_guide\_ru»**, ознакомьтесь с ним для установки программы и работы с ней при исследовании ОПК. Запустите программу. При затруднениях в установке и запуске программы обратитесь к Вашему системному администратору.
- Ознакомьтесь со сведениями о гистологических виртуальных препаратах. Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК на экране компьютера, его необходимо провести как рутинное гистологическое исследование, имитирующее анализ обычных проб пациентов.
- Исследуйте полученные ОПК на экране компьютера, меняя по необходимости увеличение и область просмотра (при смене увеличения подождите некоторое время, пока изображение станет четким). Установите соответствующие гистологические диагнозы.

### Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup> – это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для представления результатов, **следуя имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в личном кабинете не позже, чем через две недели после получения Ваших результатов.

<sup>1</sup> Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 422 – 425.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.