

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Биохимические исследования крови

ФСВОК-2022Программа межлабораторных
сличительных испытаний**ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
В 1-М ТРИМЕСТРЕ****(для анализаторов DELFIA)****Циклы 1-22, 2-22 и 3-22****ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования во всех трех циклах Вы получили:


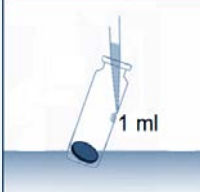
- Лиофилизированные образцы для проверки качества (ОПК) исследований по пренатальному скринингу в 1-м триместре (для анализаторов DELFIA), изготовленные из сыворотки крови человека в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в клинико-диагностических лабораториях.
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

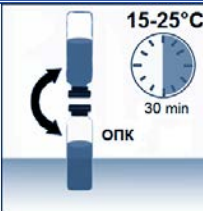

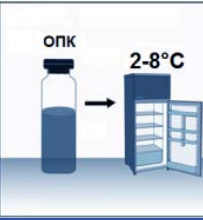

Внимание!

- **Храните ОПК при температуре 2 - 8°C. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК

- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В день исследования ОПК текущего цикла:**

<p>1. Возьмите упаковку с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла, доведите температуру ОПК до комнатной.</p>	<p>2-8°C → 15-25°C</p> 
<p>2. Сбейте с внутренней стороны пробки частицы сухого вещества (при их наличии), вскройте флаконы. Избегайте потери лиофилизата, кладите пробки на стол внешней стороной, не встряхивайте их. Пипеткой высокого класса точности добавьте (по стенке) в каждый из флаконов 1,0 мл дистиллированной воды комнатной температуры.</p>	

<p>3. Закройте каждый флакон снятой с него пробкой, оставьте стоять в течение 30 мин при комнатной температуре, периодически переворачивая, не взбалтывая!</p>	
<p>4. Если при измерении на Вашем анализаторе необходимо задать значение «срок беременности» - задайте «12-я неделя».</p>	
<p>5. Проведите по два определения показателей в каждом ОПК в день растворения лиофилизатов, в крайнем случае - в течение 3-х дней (хранить при температуре 2 - 8°C).</p>	
<p>6. Любые материалы, оставшиеся после исследования, должны быть утилизированы после использования в соответствии с действующими требованиями к утилизации биологических агентов.</p>	

Оформление результатов

Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.

➤ Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте, что все результаты выражены в указанных в форме единицах измерения.

2. Внесите коды аналитических систем и полученные результаты со всеми значащими разрядами.

КОДИФИКАТОР	
Коды анализатора	
DELIA	341000
ФСВОК	
ЛАБОРАТОРИЯ №	
Позиция	Код
единицы измерения	анализатора
β-ХГЧ	47
РАРР-А, мМЕ/мл ²	

3. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества ОПК

- удовлетворительная

- неудовлетворительная

➤ Если в 100 аналитических сериях или в течение 6 мес. текущего года Вами использовался один и тот же лот образцов для внутрिलाбораторного контроля, **Вы можете получить интегральную оценку этих серий по параметрам «сигмаметрии»**. Для этого в цикле 3-22 заполните страницу формы, содержащую запрос о параметрах карты внутрिलाбораторного контроля.

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.