

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Биохимические исследования крови

ФСВОК-2022Программа межлабораторных
сличительных испытаний**НЕОНАТАЛЬНЫЙ
СКРИНИНГ**

Циклы 1-22, 2-22 и 3-22

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» для использования во всех трех циклах Вы получили:


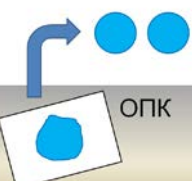
- Сухие пятна крови - образцы для проверки качества (ОПК) исследований показателей неонатального скрининга, изготовленные из крови новорожденных в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в клиничко-диагностических лабораториях.
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

Внимание!


- **Храните ОПК при температуре от -20°C до -18°C в упаковке, в которой Вы их получили. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК

- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами в текущих аналитических сериях, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **В день исследования ОПК текущего цикла:**

<p>1. Возьмите упаковку с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла, доведите температуру ОПК до комнатной.</p>	<p>-18 °C → 15 – 25 °C</p> 
<p>2. Из каждого ОПК выберите по два диска и проведите в каждом из них определение соответствующего показателя.</p>	

3. В случае невозможности провести анализ ОПК для всех показателей в один день в одной аналитической серии допускается **проводить анализ ОПК для разных показателей в разные дни при их хранении в упаковке производителя при температуре -18°C.**

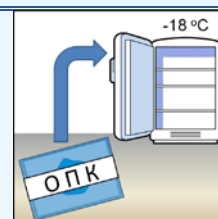

4. Вскрытые упаковки с ОПК допускается хранить вместе с осушителем в герметично закрытом полиэтиленовом пакете при температуре **2 - 8°C** не более двух дней.



5. Любые материалы, оставшиеся после исследования, должны быть утилизированы после использования в соответствии с действующими требованиями к утилизации биологических агентов.



Оформление результатов

Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.

➤ Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям. При этом:

1. Проверьте, что все результаты выражены в **указанных в форме единицах измерения.**

2. Внесите **коды производителей реагентов** и полученные результаты со всеми значащими разрядами.

3. Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества ОПК

- удовлетворительная

- неудовлетворительная

➤ Если в 100 аналитических сериях или в течение 6 мес. текущего года Вами использовался один и тот же лот образцов для внутрिलाбораторного контроля, **Вы можете получить интегральную оценку этих серий по параметрам «сигмаметрии».** Для этого в цикле 3-22 заполните страницу формы, содержащую запрос о параметрах карты внутрिलाбораторного контроля.

Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.