

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
БИОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. КОСТНЫЙ МОЗГ.

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Цитогенетические исследования. Биологические материалы. Костный мозг.

# ФСВОК-2022

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРИОТИПА (цифровые фотографии препаратов лимфоцитов в ЛК)

### ИНСТРУКЦИЯ

#### по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

##### Общие положения

Для работы по указанному разделу МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- Цифровые фотографии метафазных пластинок в лимфоцитах периферической крови, окрашенных красителем Гимза (GTG) - образцы для проверки качества (ОПК) цитогенетических исследований, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК».
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения ОПК и работы с ними не требуется.
- Возвращения фотографий не требуется.


##### Внимание!

- ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

##### Исследование ОПК

##### В день исследования:

1. Войдите в Личный кабинет АСНП «ЦВКК», откройте форму ввода результатов соответствующего раздела.
2. В форме ввода результатов нажмите кнопку «Скачать файл».

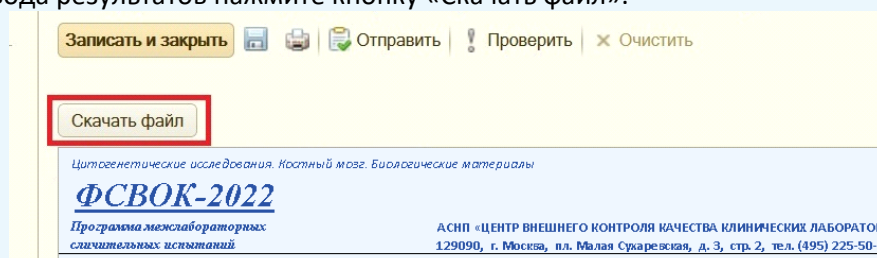

3. Извлеките фотографии из загруженного архива.
4. Анализируйте фотографии с учетом приведенных для них в форме раздела клинических данных. **Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК.** Исследование цифровых фотографий на экране компьютера необходимо провести как рутинное исследование (или имитацию рутинного исследования) обычных проб пациентов по принятой в лаборатории методике.

### Оформление результатов

- Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>1</sup> - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
- Заполните форму для результатов. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

### Получение отчета

- Ваши цитогенетические диагнозы будут сопоставлены с диагнозами, установленными экспертами МСИ «ФСВОК».
- Отчет по оценке качества выполненных исследований, содержащий комментарии экспертов по предоставленным Вами цитогенетическим диагнозам и заключениям, будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три недели после предоставления результатов.

---

<sup>1</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.