

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2 тел. (495)  
225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Микроскопические исследования.

Отделяемое мочеполовых органов

# ФСВОК-2022

Программа межлабораторных  
сличительных испытаний

**ВОЗБУДИТЕЛИ ИНФЕКЦИЙ,  
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ:  
T. vaginalis В ОТДЕЛЯЕМОМ  
МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ  
(окрашенные препараты лаборатории)**

## ИНСТРУКЦИЯ

**по подготовке образцов для проверки качества, оформлению и отправке результатов  
их исследования для экспертной оценки**

### Общие положения

Вы получили:

- Контейнеры для отправки на оценку экспертам МСИ «ФСВОК» препаратов Вашей лаборатории (образцов для проверки качества исследований (ОПК)), упакованные в пузырчатый пакет и гофрокоробку. **Сохраните упаковку** для отправки препаратов.
- Этикетки для маркировки ОПК.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

### Отбор и исследование ОПК

- **Внимание! СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ НАЧНИТЕ ОТБОР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПК** отделяемого слизистой уrogenитального тракта. Допускается отбор среди уже исследованных в Вашей лаборатории препаратов.
- Не создавайте «специальные» условия для изготовления и исследования ОПК, используйте стандартную методику с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Отберите:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>7 препаратов</b>, в которых были выявлены трихомонады;</li> <li>- <b>3 препарата</b>, в которых трихомонады выявлены не были.</li> </ul> </li> </ul>	
---	--

- Наклейте на каждый ОПК по одной из присланных этикеток.
- Сохраняйте ОПК при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей, до отправки их в АСНП «ЦВКК».

### Оформление результатов


- **Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете.**
- Распечатайте заполненную форму (при бумажном документообороте заполните форму): ее необходимо отправить в АСНП «ЦВКК» вместе с ОПК.
- **При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ При необходимости возврата ОПК в Вашу лабораторию после экспертной оценки отметьте соответствующую ячейку в форме ввода результатов.</li> </ul>	<p><b>ОПК вернуть в лабораторию:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> - да <input type="checkbox"/> - нет</p>
--	---


- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

### Упаковка и отправка ОПК

- Вложите отобранные ОПК в присланные контейнеры, предварительно удалив иммерсионное масло, заклейте их скотчем.

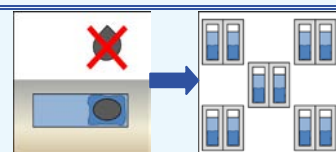

- Контейнеры поместите в пузырчатый пакет и вложите его в гофрокоробку вместе с заполненной формой. Заклейте гофрокоробку скотчем.

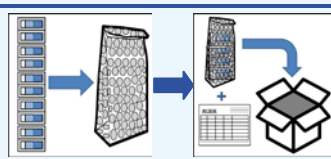

- Позвоните по тел. **(495) 225-50-31** и сообщите оператору о необходимости вызова курьера (курьерская доставка входит в стоимость раздела).
- Передайте курьеру упакованные согласно инструкции ОПК в назначенные время и дату.

#### Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три недели после получения изготовленных в лаборатории ОПК с заполненной формой для результатов.