

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Микроскопические исследования яйцеклеток
и эмбрионов. Клиническая эмбриология

ФСВОК-2022

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ (цифровые фотографии)

Циклы 1-22, 2-22 и 3-22

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы во всех циклах указанного раздела МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- USB-флеш-накопитель с цифровыми препаратами биологических материалов человека - образцами для проверки качества исследований (ОПК), изготовленными в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Для указанного раздела ОПК представлены 12 цифровыми фотографиями нативных ооцитов и эмбрионов человека (по 4 для каждого цикла).
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для работы с цифровыми фотографиями не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела, **введите пароль**, указанный в форме для результатов и откройте TIF-файлы нужного цикла.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ (цифровые фотографии), цикл 1-22

Представление результатов

ЛАБОРАТОРИЯ №

Регион:

Пароль доступа к папке КЭ:

Отметьте ячейки, соответствующие Вашим результатам анализа фотографий (ОПК) - двойным кликом по соответствующей ячейке и кликом по появившемуся числу.
Для удаления ошибочно введенных данных кликните на соответствующую ячейку (один клик!) и нажмите кнопку "очистить" на верхней панели.

Имя фотографии:	1	2	3	4

- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, отметьте присутствующие в препаратах объекты, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные микроскопические исследования.
- Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

Оформление результатов

- Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Отметьте выявленные Вами объекты. Если выявленные объекты в форме не представлены, приведите их в ячейках «Другое».

- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО
 - удовлетворительная
 - неудовлетворительная

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.