

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Микроскопические исследования яйцеклеток
и эмбрионов. Клиническая эмбриология

ФСВОК-2022

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ РАЗВИТИЯ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ (цифровые фотографии в ЛК)

Циклы 1-22, 2-22 и 3-22

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы во всех циклах указанного раздела МСИ «ФСВОК» Вы получили:

- Цифровые фотографии ооцитов и эмбрионов человека - образцы для проверки качества исследований (ОПК), изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». Для данного раздела ОПК представлены 12 цифровыми фотографиями (по 4 для каждого цикла), доступными для скачивания из личного кабинета.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для работы с цифровыми фотографиями не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.
- Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК. Исследование цифровых фотографий на экране компьютера необходимо провести как имитацию рутинного исследования обычных проб пациентов по принятой в лаборатории методике.

В день исследования:

1. Войдите в Личный кабинет АСНП «ЦВКК», откройте форму ввода результатов нужного цикла.
2. В форме ввода результатов нажмите кнопку «Скачать файл».



3. Извлеките цифровые фотографии из загруженного zip-архива.
4. Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

Оформление результатов

- Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете¹ - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.
- Отметьте выявленные Вами объекты. Если выявленные объекты в форме не представлены, приведите их в ячейках «Другое».

➤ Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества КО
 - удовлетворительная
 - неудовлетворительная

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через три рабочих дня после назначенной даты обработки.

¹ При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.