

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Бактериологические исследования

ФСВОК-2022

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

**ВЫЯВЛЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
(МБТ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (ЛЧ)
К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ (ПТП)
Цикл 1-22**

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанному разделу¹ МСИ «ФСВОК» в первом цикле Вы получили:

- Жидкие образцы для проверки качества (ОПК) бактериологических исследований, относящихся к III-й группе патогенности, изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК», пригодные для транспортировки при температуре окружающей среды и исследования методами, применяемыми в бактериологических лабораториях.
- ОПК предназначены для оценки качества выявления микобактерий туберкулеза (МБТ) и определения их чувствительности к противотуберкулезным препаратам (ПТП).
- Сопроводительные документы, размещенные в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>. В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.

Внимание!

- **Храните ОПК при температуре +2 - +8° С, но не дольше 10-ти дней. Примите во внимание, что на Вас лежит ответственность за соблюдение условий хранения.**
- **ИССЛЕДУЙТЕ ОПК сразу после их получения.**
- Результаты исследований должны быть представлены в сроки, указанные в бланках для представления результатов (формы ТБ-ЖС, ТБ-ППС, ТБ-МАК, ТБ-МГ и ЛЧ) и направленном Вам **КАЛЕНДАРЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ**.
- Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

Исследование ОПК

- Не создавайте «специальные» условия для анализа ОПК, проводите исследование вместе с рутинными пробами, с соблюдением требований ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».
- **ОПК должны быть исследованы как осадки мокроты, прошедшей предпосевную обработку, и вместе с ними.**
- **В день исследования ОПК:**
 1. Доведите температуру ОПК до комнатной.
 2. Если одновременное исследование всех 12-ти ОПК вызывает у Вас трудности, то разделите их на 2-3 партии.
 3. Перемешайте каждый ОПК на «Вортексе» или путем многократного встряхивания, после чего осторожно вскройте их.
 4. Выполните с каждым ОПК все этапы исследований в соответствии с используемыми Вами методиками.

Оформление результатов

- **Внесите и отправьте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете² - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- **При заполнении форм для результатов следуйте имеющимся на них указаниям.**
- При определении чувствительности МБТ к ПТП укажите в таблице определенную чувствительность: **S** или **R**.
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после назначенной даты обработки.

¹ Для разделов МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 046, 462, 463, 047.

² При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.