

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФСВОК-2021

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2
тел. (495) 225-5031, labs@fsvok.ru, www.fsvok.ru

Цитологические исследования биологического материала

ФСВОК-2021

Программа межлабораторных
сличительных испытаний

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ¹

Циклы 1-21, 2-21 и 3-21

ИНСТРУКЦИЯ

по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов

Общие положения

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в трех циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель, содержащий 6 цифровых препаратов биологических материалов человека – образцы для проверки качества исследований (ОПК), изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». По 2 ОПК в каждом из трех циклов раздела, каждый из которых содержит 6 цифровых фотографий и краткие клинические данные о пациенте, сведения о характере материала, способе окрашивания и использованном увеличении.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

Исследование ОПК

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.
- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела и нужного цикла, откройте ppt-файлы и введите **пароль**, указанный в форме для представления результатов. Включите режим «показ слайдов».
- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные цитологические исследования.
- Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

Оформление результатов

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете² - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.**
- Заполните форму для результатов **с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.**
- Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Получение отчета

- Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после предоставления результатов.

¹ Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 108 – 113.

² При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.