

АСНП «ЦЕНТР ВНЕШНЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  
КЛИНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

# ФСВОК-2022

ПРОГРАММА МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ  
СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2  
тел. (495) 225-5031, [labs@fsvok.ru](mailto:labs@fsvok.ru), [www.fsvok.ru](http://www.fsvok.ru)

Цитологические исследования биологического материала

**ФСВОК-2022**Программа межлабораторных  
сличительных испытаний**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ЦИФРОВЫХ ФОТОГРАФИЙ<sup>1</sup>**

Циклы 1-22, 2-22 и 3-22

**ИНСТРУКЦИЯ****по исследованию образцов для проверки качества и оформлению результатов****Общие положения**

Для работы по указанным разделам МСИ «ФСВОК» в трех циклах Вы получили:

- USB-флеш-накопитель, содержащий 6 цифровых препаратов биологических материалов человека – образцы для проверки качества исследований (ОПК), изготовленные в соответствии с техническим заданием АСНП «ЦВКК». По 2 ОПК в каждом из трех циклов раздела, каждый из которых содержит 6 цифровых фотографий и краткие клинические данные о пациенте, сведения о характере материала, способе окрашивания и использованном увеличении.
- Сопроводительные документы (размещены в личных кабинетах, созданных для каждого участника МСИ на интернет-портале <http://www.fsvok.ru>). В случае выбора в Договоре/Контракте бумажных форм документов последние предоставляются дополнительно.
- Особых условий для хранения USB-флеш-накопителя и работы с ним не требуется.
- Возвращения USB-флеш-накопителя не требуется.

**Исследование ОПК**

- **Внимание!** ИССЛЕДУЙТЕ ОПК **В СООТВЕТСТВИИ С КАЛЕНДАРЕМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.**
- Для сокращения сроков получения оценки выполненных исследований проводите их непосредственно **перед указанными в календаре датами!** Результаты, поступившие с опозданием, обрабатываются со значительной задержкой. Фактическая дата поступления результатов будет указана в Отчете по оценке качества исследования.
- Результаты, поступившие после окончания действия Договора/Контракта об участии в МСИ, не принимаются.

- Вставьте USB-флеш-накопитель в USB-порт компьютера, выберите папку раздела и нужного цикла, откройте ppt-файлы и введите **пароль**, указанный в форме для представления результатов. Включите режим «показ слайдов».

№ ОПК	Диагноз заболевания	Методы исследования*	
		Диагноз	Методы исследования
01 01		<input type="checkbox"/> Цитологический	<input type="checkbox"/> Цитологический
		<input type="checkbox"/> Цитологический	<input type="checkbox"/> Цитологический
		<input type="checkbox"/> Цитологический	<input type="checkbox"/> Цитологический
		<input type="checkbox"/> Цитологический	<input type="checkbox"/> Цитологический

- Не создавайте «специальные» условия для исследования ОПК, имитируя на экране компьютера проводимые в Вашей лаборатории рутинные цитологические исследования.
- Анализируйте цифровые фотографии с учетом приведенных для них клинических данных.

**Оформление результатов**

- **Вносите и отправляйте полученные результаты исследований в Вашем личном кабинете<sup>2</sup>** - это значительно ускоряет их получение АСНП «ЦВКК» и обработку.
- Заполните форму для результатов с нужным (ПРОВЕРЬТЕ!) номером цикла. При заполнении формы следуйте имеющимся на ней указаниям.

<sup>1</sup> Разделы МСИ «ФСВОК» с каталожными номерами 108 – 113.

<sup>2</sup> При бумажном документообороте отправьте результаты любым удобным для Вас способом (через личный кабинет или по почте) без дублирования отправки.

➤ Оцените качество ОПК. Ваши предложения/замечания направляйте через личный кабинет или письмом на наш электронный или почтовый адрес.

Ваша оценка качества ОПК

- удовлетворительная

- неудовлетворительная

### Получение отчета

➤ Отчет по оценке качества выполненных исследований будет размещен в Вашем личном кабинете не позже, чем через две недели после предоставления результатов.